

## TLLEN INHALACYJNY FOKUSMED FTL1

Przeznaczony jest dla osób, u których zawartość tlenu we krwi wynosi poniżej 94 %. Zalecane jest równoczesne stosowanie z pulsoksymetrem. Produkt nie jest produktem medycznym i stosuje się go w celach rekreacyjnych. **Nie można go stosować u dzieci poniżej 13 roku życia.**

- Model – FTL 1
- Wielkość – 65 mm x 370 mm
- Pojemność – 1 l
- Objętość gazu – 14 l
- Maksymalne ciśnienie – 12 bar
  - Zawartość – 99,5 % tlenu, 0,5 % powietrza atmosferycznego, aromat zapachowy – mięta

Zadaniem produktu jest przede wszystkim uzupełnienie niedoboru tlenu, które jest spowodowane wysiłkiem fizycznym, zmęczeniem, wysokościami, stresem, smogiem czy stanami chorobowymi. Poza tym ożywia umysł i ciało, a także niweluje nieprzyjemne uczucie po spożyciu alkoholu oraz poprawia koncentrację.

Sposób użycia:

- Zdejmij pokrywę z górnej części butelki.
- Podłącz maskę tlenową do zaworka.
- Umieść maskę na twarzy – tak, aby zakrywała szczelnie usta i nos. Upewnij się, że naciąg gumki jest prawidłowo ustawiony. Dopasuj metalowy klips do nosa.
- Powoli naciskaj dyszę przytrzymując podczas wdechu w odstępach 1-2 sekundowych.
- Po zakończeniu tlenoterapii, odłącz maskę od zaworu i zakryj zawór pokrywą.

